




漂白・洗浄剤 | 血液・体液・がんこなカビ汚れ用

# Renew リニュー

## 酸素系漂白洗浄剤

### リニュー ＜Renewの3つの特長＞

- 1 優れた洗浄力+漂白力**  
せんい製品のがんこな汚れやカビを強力に除去  
ニオイが気になる福祉用具も快適にリフレッシュ
- 2 高い除菌力**  
広範囲の微生物に対し高い除菌力を発揮
- 3 色柄物にも安心**  
酸素系漂白剤なので色落ちの心配なし

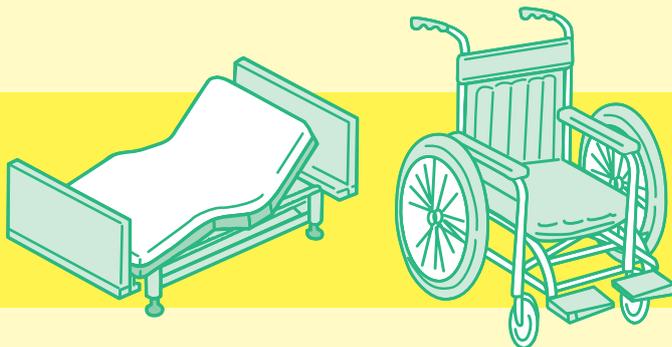

2.0kg

**用途**

福祉用具（エアマット、マットレス、マットレスカバー、車イスの座シート、背シートなど）のせんい部分の漂白・除菌

**成分**

過炭酸ナトリウム、漂白活性化剤、有機酸塩

**液性**

弱アルカリ性（希釈時）

**使用方法**

40～80℃のお湯によく溶かし、一晩浸漬したあと、流水でよくすすいでください

**希釈の目安**


汚れの種類	希釈倍率
血液・体液などの汚れ	約100倍（1Lのお湯に10g 10Lのお湯に100g）
がんこなカビの汚れ	約20倍（1Lのお湯に50g 10Lのお湯に500g）

汚れの程度に応じて、希釈倍率20～100倍の範囲で調節してください。

# リニュー Renew 酸素系漂白洗剤

## カビなどの汚れに対する漂白力

写真は、100倍希釈液にて40℃から常温で一晩浸漬したものです。  
市販の漂白剤で落ちなかった汚れを落としました。

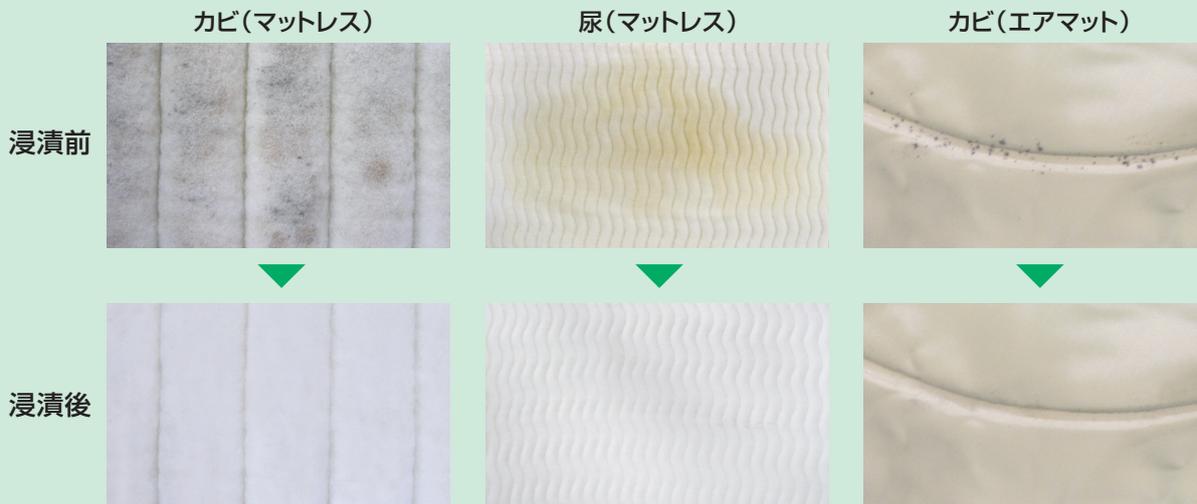

## 細菌に対する除菌力試験

「Renew」はグラム陰性菌およびグラム陽性菌のいずれに対しても、高い除菌力を示しました。

供試菌	初期菌数	希釈倍率	5分	10分	30分
グラム陰性菌	2.3×10 <sup>9</sup> CFU/mL	100倍	—	—	—
		20倍	—	—	—
グラム陽性菌	2.6×10 <sup>9</sup> CFU/mL	100倍	—	—	—
		20倍	—	—	—
グラム陰性菌	8.0×10 <sup>9</sup> CFU/mL	100倍	—	—	—
		20倍	—	—	—

—:陰性

## 使用上の注意

### 使えるもの

- 白物、色物、柄物のせんい製品(木綿、麻、化学せんい)
- プラスチック製品 ●木、竹製品 ●陶器 ●ガラス器

### 使えないもの

- 毛、絹のせんい製品 ●絵表示 のついたもの
- 水や洗たく用洗剤で色がでるもの
- 含金属染料で染められたもの
- 金属製の容器や付属品

※せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻りません。



一晩浸漬した  
溶液は、再使用  
しないでください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
酸素系漂白洗剤 リニュー	2.0kg	4	51501	49-87696-51501-7

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間: 平日 9:00~18:00)