



ニトリルグローブ エクステンド

Nitrile Glove Extend

販売名：サラヤニトリルグローブエクステンド
一般医療機器 届出番号：27B1X00120000202
非天然ゴム製検査・検診用手袋、歯科用手袋
食品衛生法適合品(厚生省公示第370号)

Nitrile Examination Gloves

- ✓ 優れた伸縮性&フィット感
- ✓ パウダーフリー・ラテックスフリー
- ✓ 指先すべり止め加工
- ✓ めくり上がり防止カフ



製品供給能力を増強するため、
ニトリル手袋の自社工場での
製造体制を構築。
高い品質と安定供給を実現します。

自社工場の
紹介動画は
こちらから




Personal
Protective
Equipment

ホワイト / 200枚
ブルー / 200枚

手袋を衛生的に取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。

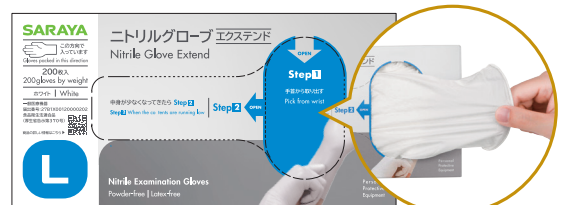

用途

湿性生体物質に接触する可能性のある場合や傷・粘膜に触れる場合など、様々な場面でお使いいただけます。

- 採血 ● 創傷処置 ● 注射剤のミキシング
- 汚物・吐物処理 ● 器材の洗浄・消毒
- 気管吸引 ● 環境整備
- 末梢血管カテーテル留置
- 尿道カテーテル挿入 ● 検体の取り扱い など

その他、介護現場、食品加工、化学実験など、様々な用途に適応します。

仕様

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm)	≥ 240			
手のひら幅 ±5 (mm)	75	85	95	105
厚み (mm)	指先 : 0.10 ± 0.02			
	手のひら : 0.08 ± 0.02			
ピンホール品質基準	AQL 1.5			
引張り強度 (MPa)	老化前 ≥ 26			
	老化後 ≥ 24			
最大伸長度 (%)	老化前 ≥ 500			
	老化後 ≥ 400			

ホワイト



サイズ：XS,S,M,L

ブルー



サイズ：XS,S,M,L

※パッケージに表記のある「XLサイズ」は海外向けの取扱いサイズとなります。ご了承ください。

着脱方法

※手袋を外すときは、汚染面が素手に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかりと行うことが重要です。

着け方	外し方				
手首の部分を つかんで装着する	片方の手袋の 袖口をつかむ	手袋を裏表逆にな るように外す	手袋を外した手を 反対の手袋の袖口に 差し込む	裏表逆になるよう に外す	外した手袋はすぐ に廃棄する

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	JANコード
サラヤニトリルグローブエクステンド ホワイト	200枚入 / XS	10	50945	49-87696-50945-0
	200枚入 / S		50946	49-87696-50946-7
	200枚入 / M		50947	49-87696-50947-4
	200枚入 / L		50948	49-87696-50948-1
サラヤニトリルグローブ エクステンド ブルー	200枚入 / XS	10	50966	49-87696-50966-5
	200枚入 / S		50967	49-87696-50967-2
	200枚入 / M		50968	49-87696-50968-9
	200枚入 / L		50969	49-87696-50969-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)