



DISPOSABLE PE APRON WIDE

サラヤ プラスチックエプロンワイド

防水性の高いポリエチレン製

血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者の感染リスクを低減します。

カバー範囲が広いデザイン設計

従来品から首周りの形状を改良し、防護面積がアップ。

3色のカラー展開

用途や使用部署によりカラーコードを設定して使い分けることができます。



ブルー



70枚入



ピンク



70枚入




ホワイト




70枚入



首周りの形状を改良し防護面積アップ
※当社従来品比

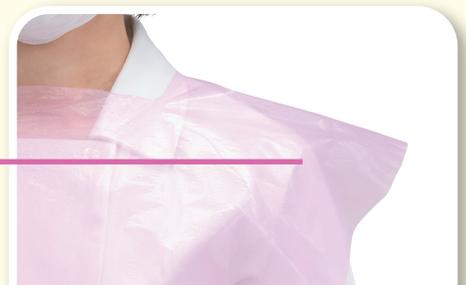

ワイドな肩幅により汚染リスクを低減

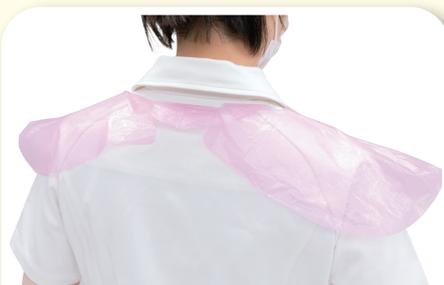

背中部分までカバー

1枚サイズ(mm)：総丈約1,200×身幅約720

標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りやしぶきが生じる手技や患者ケアを行う場合、医療従事者の衣類や体幹部を保護するために、防水性のあるエプロンの着用がすすめられています。


プラスチックエプロンワイドの使用法

着け方



- ① 首の部分を持ってかぶる
- ② 腰ひもを広げ、背中にまわし、腰ひもを結ぶ


外し方

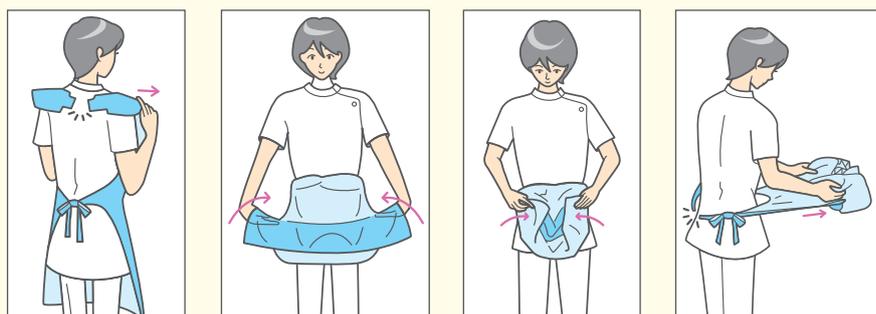

- ① 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る
- ② エプロンの表側が内側になるようにして腰ひもの高さまで2つに折り込み、表側に触れないよう注意しながら両手でエプロンの裾をすくい上げる
- ③ 表側が内側になるようまとめる
- ④ 体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、エプロンの表側に触れないよう注意しながら、廃棄する

設置に便利なPPEホルダー

- サラヤPPEホルダー（ステンレス製）
手袋・エプロン用

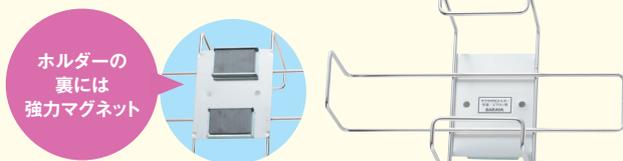

商品コード：51088
サイズ(mm)：W244×D105×H141
入数：12

- サラヤPPEホルダー（アクリル製）



商品コード：51062
サイズ(mm)：W255×D110×H140
入数：6

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
プラスチックエプロンワイド ブルー（袖なし）	70枚入/フリー	24	51196	49-87696-51196-5
プラスチックエプロンワイド ホワイト（袖なし）	70枚入/フリー	24	51197	49-87696-51197-2
プラスチックエプロンワイド ピンク（袖なし）	70枚入/フリー	24	51198	49-87696-51198-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2022年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)