



福祉施設の環境・器具の清浄・除菌に

環境アルコール除菌剤
72.6W/W% (79.1V/V%)
〈第四級アンモニウム塩配合〉

サポステ

使いやすい500mL
スプレーボトル

- 長時間使用しても疲れにくい形状です。
- 広角と狭角の2種類の噴霧が選べます。
- 倒れにくく安定性のよいボトルです。



5L



液入り

500mLスプレー付



詰替
容器

空容器

詰替スプレーボトル 500mL



50mLスプレー付

優れた
除菌力

エタノールが
迅速な除菌効果を
発揮します。


持続的な
抗菌力

エタノール蒸発後も
残留成分により、
持続的な抗菌力が
期待できます。

抗菌力データ

サポステはエタノール蒸発後も残留成分によって
抗菌力を持続します

(Log CFU/ディスク)

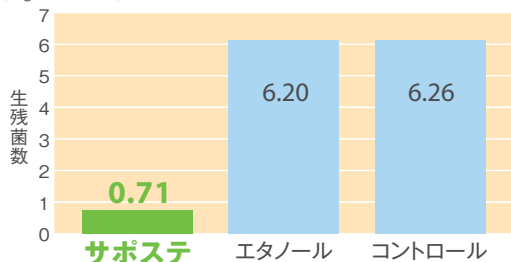

エタノール蒸発後の残留成分の黄色ブドウ球菌に対する抗菌力

サラヤ(株)バイオケミカル研究所調べ

環境アルコール除菌剤 サポステ

成分

エタノール72.6W/w%(79.1V/v%)、第四級アンモニウム塩


使用用途

環境 ドアノブ、通路や階段の手すり、ベッド柵などの清浄・除菌に


器具 車イスなどの福祉用具の清浄・除菌に

使用方法

布などに
スプレーして
拭き取ります。

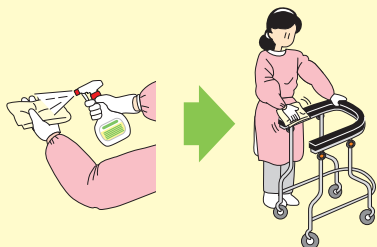

直接スプレー
して布などで
拭き取ります。

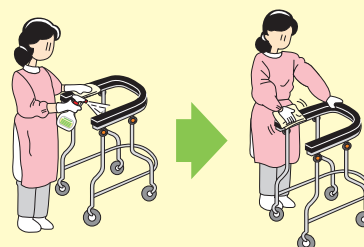

ドライロール ドライロール含浸容器

別売のドライロールにサポステを含浸させ、除菌シートとして使用するとより用途が広がります。



ドライロール



ドライロール含浸容器

ドライロール

商品コード：52106

厚手・大判サイズ：1ロール 180ピース

1ピースサイズ：170×300mm

ドライロール含浸容器

商品コード：52105

単品サイズ：W180×D180×H200mm

使用上の注意

- 用途以外には使用しない。
- 火気に近づけない。
- 取り扱う場合、換気を十分に行う。
- ミストを吸入しない。
- 作業時は状況に応じて、手袋、マスクおよび保護メガネを着用する。
- 取り扱い後は手をよく洗う。
- この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしない。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
- 他の殺菌剤・洗浄剤とは混ぜない。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サポステ	5L	3	41587	49-87696-41587-4
	500mLスプレー付	12	41589	49-87696-41589-8
	50mLスプレー付	20×4	41596	49-87696-41596-6
スプレーボトル サポステ用	500mL	12	53042	49-87696-53042-3
ドライロール	180ピース×6個入	1	52106	49-73512-71763-5
ドライロール含浸容器	1	4	52105	49-87696-52105-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)