



アルコール含浸用不織布 | サッとひとふき…生活環境用品などの除菌に!

ドライロール

経済的 衛生的 機能的

- 厚手で大判サイズのため、1枚でしっかり拭き取りできます。
- 吸水性・保水性に優れ、環境アルコール除菌剤サポステを含浸しての使用に最適です。
- コットン素材の不織布を使用。
蛍光染料などは含んでおりません。

用途

車イス・ベッド周り・通路や階段の手すり、
病院・介護施設での用具・機器などの洗浄・除菌



車イスの洗浄・除菌



ベッド周りの洗浄・除菌



180ピース/1ロール
(1ピース:170×300mm)

ドライロール含浸容器
※サポステに限らず、
含浸する薬液は別売りです。

使用方法



- 1 容器のフタの外側にある6カ所の溝部分に、マイナスドライバーや硬貨等、先が平たく硬い物を差し込みこじ上げてフタを開けます。
- 2 袋からドライロールを取り出し、含浸容器にセットします。
- 3 図にある矢印の位置までサポステを注ぎます。
- 4 ドライロール内側巻きははじめ部分の上端を取り出します。
- 5 フタの中央取り出し口の内側から通し、取り出し口とフタをパチンと音がするまでしっかりと閉じます。
- 6 使用時は取り出し口を開け、クロスを真上にゆっくり引き出してください。

使用薬剤

環境アルコール除菌剤 **サポステ**

サポステを含浸させると

優れた除菌力 + 持続的な抗菌力

- 72.6^W/w%エタノールが迅速な除菌効果を発揮します。
- エタノール蒸発後の残留成分により、持続的な抗菌力が期待できます。



5L

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ドライロール	180ピース×6	1 (6ロール入)	52106	49-73512-71763-5
ドライロール含浸容器	—	4	52105	49-87696-52105-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2023年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>