



# ニトリルエクステンドAF

## Nitrile Glove Extend AF

販売名：ニトリルエクステンドAF  
一般医療機器 届出番号：27B1X00120000900  
非天然ゴム製検査・検診用手袋  
食品衛生法適合品(厚生省公示第370号)

### Nitrile Examination Gloves

- ✓ 加硫促進剤フリー
- ✓ パウダーフリー・ラテックスフリー
- ✓ 指先滑り止め加工
- ✓ 優れた伸縮性&フィット感



Personal  
Protective  
Equipment

ブルー / 200枚

## 手袋を衛生的に取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。



# 医療・福祉の現場で働く方々の手肌を優しく守る ニトリルエクステンドAF


医療・福祉の現場では、使い捨て手袋はなくてはならないアイテムです。

しかし医療・福祉の現場で働く方々の手肌は頻繁な手袋の着脱や消毒などにより、大きな負担を受けています。

ニトリルエクステンドAFは、ニトリル手袋などのゴム製品の耐久性や伸縮性を高めるために広く使用されている加硫促進剤を一切使用していません。

加硫促進剤はゴム製品の耐久性や伸縮性を向上させる一方で、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こす原因となることが知られています。

ニトリルエクステンドAFは、このアレルギーリスクを回避しつつ、優れた耐久性と伸縮性を両立させた、手肌に優しいニトリル手袋です。

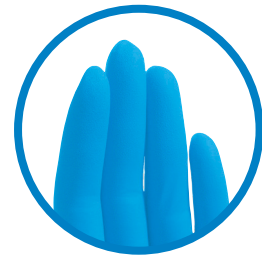

指先滑り止め加工



## ニトリルエクステンドAF 物性データ (各サイズ共通)

### バリア性

試験項目	評価結果
血液由来病原体透過性：ISO 16604	合格

### 感作性

試験項目	評価結果
一次皮膚刺激 グローブが接触する皮膚への刺激評価	無刺激
感作性試験 グローブからの抽出物による、皮膚感作 (TypeIV: 遅延型過敏症免疫反応) について評価	目に見える 変化なし

### 抗がん剤耐性試験：ASTM D6978-05

試験薬剤	濃度	透過時間
カルムスチン	3.3mg/mL	36.2分
シスプラチン	1.0mg/mL	>240分
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240分
ダカルバジン	10.0mg/mL	>240分
ドキシソルピシン塩酸塩	2.0mg/mL	>240分
エトポシド	20.0mg/mL	>240分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240分
メトレキサート	25.0mg/mL	>240分
マイトマイシンC	0.5mg/mL	>240分
パクリタキセル	6.0mg/mL	>240分
チオテパ	10.0mg/mL	24.3分
ピンクリスチン硫酸塩	1.0mg/mL	>240分

### 仕様

サイズ	XS	S	M	L
全長(mm)	≥230			
手のひら幅 ±5(mm)	75	85	95	105
厚み(mm)	指先 ≥0.05 手のひら ≥0.05			
ピンホール品質基準	AQL 2.5			
引張強度(MPa)	老化前 ≥14 老化後 ≥14			
最大伸長度(%)	老化前 ≥500 老化後 ≥400			

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ニトリルエクステンドAF	200枚入 / XS	10	50933	49-87696-50933-7
	200枚入 / S		50934	49-87696-50934-4
	200枚入 / M		50935	49-87696-50935-1
	200枚入 / L		50936	49-87696-50936-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合があります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。  
■ 記載内容は2025年3月現在のものです。

### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間：平日 9:00～18:00)