



トイレ・ベッドパン用洗剤

# トイレまもるさん<sup>+</sup>

原液使用

便器やベッドパンなどの洗剤・防汚に



5kg



詰替スプレーボトル 500mL泡タイプ

ラベンダー  
の香り

原液

泡状  
中性

環境  
対応  
減容容器


泡状

空容器

便利な  
詰替容器

- 便汚れに対する  
高い洗剤効果を発揮
- 硬質表面に対する  
防汚効果を発揮
- ベッドパン、尿器、  
ポータブルトイレ用バケツ、  
シャワーボトル、吸引瓶なども  
洗剤と防汚が可能

## 洗剤対象物

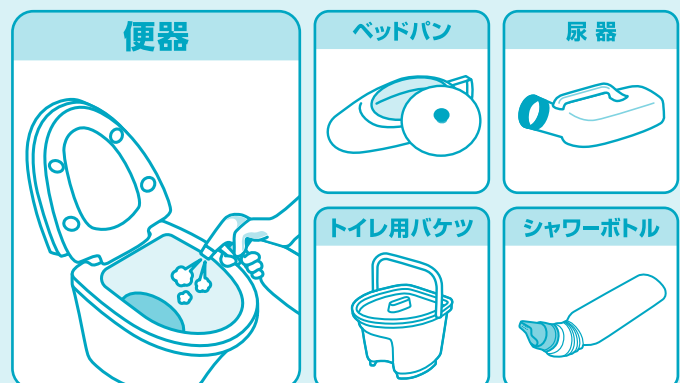

# トイレ・ベッドパン用洗剤 トイレまもるさん<sup>+</sup>


「トイレまもるさん」は、洗浄時に特別な成分が表面を覆うことで親水性が向上します。これにより、水が汚れの下に入りやすくなり、汚れが浮き上がって落としやすくなります。



## 防汚効果試験方法

- ① 本製品をポリプロピレン製のボトルに入れ、そこにスライドガラスを浸漬させて1分間静置しました。
- ② スライドガラスを取り出して10分間静置した後、上面から水道水を流したうえで乾燥させました。
- ③ モデル汚れにスライドガラスを浸漬させ、防汚効果を目視で確認しました。

## イメージ

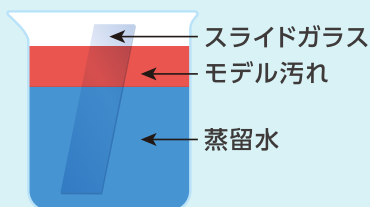

トイレまもるさんで処理したテストピースは、未処理と比較して高い防汚効果を示しました。

## 成分

界面活性剤(0.5%、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、溶剤、安定化剤、防腐剤、香料、pH調整剤、金属イオン封鎖剤

## 液性

中性

## 用途

トイレ(便器)およびその周辺の洗浄と防汚  
ベッドパン、尿器、ポータブルトイレ用パケツ、  
シャワーボトル、吸引瓶などの洗浄と防汚

## 使用方法

スプレーした後、柄付きのスポンジやブラシなどで  
洗浄し、流水ですすぐ  
(使用量の目安:原液を1㎡に対して約4回噴射)

## 便座の除菌には 便座きれいくんNV

ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮する便座除菌クリーナーです。便座の材質への影響にも配慮しています。便座以外にも水栓レバーや便座のフタ、ドアノブなどにお使いいただけます。



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
トイレまもるさん	5kg	3	50376	49-87696-50376-2
スプレーボトル トイレまもるさん用	500mL泡タイプ	12	50375	49-87696-50375-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2025年8月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
(受付時間: 平日 9:00~17:00)