



サラヤ エタノールクロス 80

高濃度配合で強力除菌

環境表面を迅速且つ
強力に除菌

高濃度
エタノール
(80vol%)配合




製品特徴


1. エタノールが除菌効果を発揮します。
2. エタノールと精製水のみを含有しているため、薬剤の残留がありません。
3. 二度拭きが要りません。

250枚入 容器 大判クロス
1枚サイズ:150×300mm

用途 看護器具・ベッド柵・オーバーテーブル・クリーンベンチ・聴診器などの除菌・清拭に。

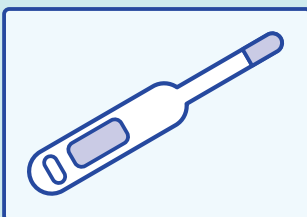


看護器具に

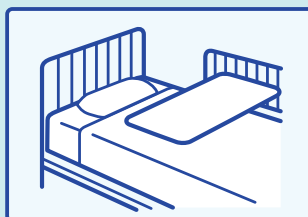

ベッド柵、オーバーテーブルに



クリーンベンチに

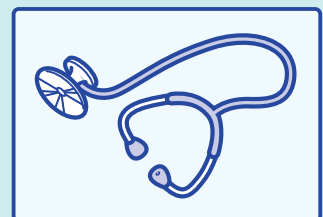

聴診器に

医療施設・介護施設の環境清拭に サラヤエタノールクロス80

80枚入

1枚サイズ：140×210mm



80枚入
容器

フタに
開封日記録シール付き



80枚入
詰替

詰替えるたびに新しい
取り出し口に交換できます



250枚入

1枚サイズ：150×300mm



250枚入
容器

フタに
開封日記録
シール付き



250枚入
詰替

詰替える
たびに新しい
取り出し口に
交換できます



480枚入

1枚サイズ：150×250mm



480枚入
容器

フタに
開封日が
書き込めます



480枚入
詰替

詰替える
たびに新しい
取り出し口に
交換できます



使用上の注意

- 乾燥を防ぐために使用後はフタをしっかりと閉めてください。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがありますので、目立たない部分で試してから使用してください。
- 機器などに使用のときは機器付属の「取扱説明書」をご覧ください。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
- 使用時には手袋を着用してください。
- 不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 使用している不織布の性質上、経時的に不織布が変色することがありますが、使用上問題ありません。

保管上の注意

- 熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざける。禁煙。
- 換気のよい涼しい場所で保管する。容器を密閉しておく。
- 小児や認知症の方の手の届かない所に保管する。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤエタノールクロス80	80枚入容器	20	44162	49-87696-44162-0
	80枚入詰替	20	44163	49-87696-44163-7
	250枚入容器	6	44160	49-87696-44160-6
	250枚入詰替	6	44161	49-87696-44161-3
	480枚入容器	4	44143	49-87696-44143-9
	480枚入詰替	4	44144	49-87696-44144-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
 (受付時間：平日 9:00～18:00)