



サラヤ ジアクロス

環境表面を強力に除菌・洗浄

使用時に専用液を含浸
細菌・ウイルスを強力に除去

次亜塩素酸
ナトリウム
0.1%以上



230mL専用液



80枚入詰替 特許第6819974号



80枚入容器 特許第6819974号

製品特徴

1. 次亜塩素酸ナトリウム配合の専用液をドライクロスに含浸
(専用液は希釀不要)
2. 相性の良い薬液とクロスの組み合わせで、長期間の安定性を実現
(含浸後2ヶ月間において、有効塩素濃度：1,000ppm以上を維持)
3. 幅広い細菌・ウイルスに対して、高い除去効果を発揮



専用液をドライクロスに含浸



次亜塩素酸ナトリウム含浸のクロスで



環境表面の除菌・洗浄

- 大久保憲、尾家重治、金光敬二 編集. 2020年版消毒と滅菌のガイドライン. へるす出版, 東京, 2020.
- ノロウイルス(環境の消毒) : 0.1% (1,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウムで消毒 クロストリディオイデス・ディフィンル (環境の消毒) : 0.1% (1,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウムで清拭
- 公益社団法人日本透析医会. 透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(五訂版). 2020年4月30日.
- 患者療養環境の消毒 : 次亜塩素酸ナトリウムの使用を推奨 ノロウイルス(高頻度接触環境表面) : 清拭後、0.05~0.1% 次亜塩素酸ナトリウム液を用いて消毒
- CDC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities, 2003.
- 血液あるいは体液がこぼれた場所 : 清拭後、500~615 ppm次亜塩素酸ナトリウムで消毒

環境表面を強力に除菌・洗浄 サラヤ ジアクロス

サラヤ ジアクロス 安定性評価


方法

サラヤ ジアクロス専用液を各種クロスに含浸させ、室温で保管しました。含浸直後および一定期間保管後の有効塩素濃度から残存率を求めました。

結果

サラヤ ジアクロスは、薬液含浸2ヶ月後も、高い残存率(有効塩素濃度: 1,000ppm以上)を維持しました。一方、そのほかのクロスでは、薬液含浸直後から有効塩素濃度は著しく低下し、1~5日後には失活しました。

● ジアクロス専用クロス - ◇ レーヨン - * 紙(パルプ)
▲ パルプ、ポリエチレン ■ レーヨン、PET ● 紙(再生紙)

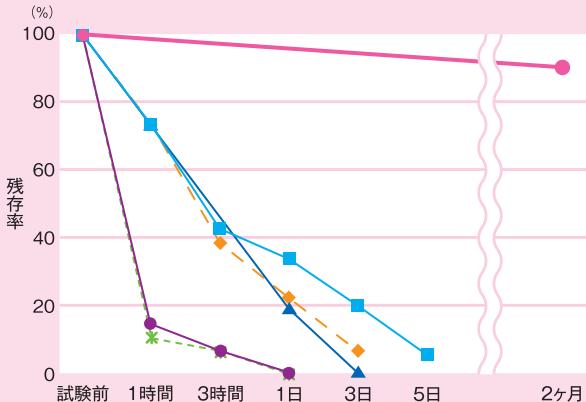

用途

ドアノブ・手すり、机・棚、ベッド柵・オーバーテーブル、機器表面、トイレまわりなど環境表面・器具・物品などの除菌・洗浄に。



ドアノブ・手すりに



机・棚に



ベッド柵・オーバーテーブルに



機器表面に



トイレまわりに

※機器などに使用のときは機器付属の「取扱説明書」をご覧ください。

使用方法・使用上の注意



開封した内袋を袋のまま容器に入れてください。



内袋にサラヤ ジアクロス専用液をゆっくりと全量注ぎ、クロス全體を浸してください。



クロスを中央から取り出し、クロスの先端をフタ中央の穴に通します。



フタを閉め、取り出しがけのクロスの先端を指でつまみ引き上げます。



ご使用の際は、取り出しがけのフタを開けて、中央から1枚ずつ取り出してください。ご使用後は取り出しがけのフタを閉めてください。

○ 使えるもの

プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品

× 使えないもの

銅、鉄および真鍮の容器・用具、漆器、大理石、色物・柄物の繊維製品(漂白されます)

※使用時にはマスク・手袋・ゴーグルなどの防護具を着用してください。必ず使用前に「サラヤ ジアクロス専用液」に記載されている「使用上の注意」「応急処置」をよく読んでからお使いください。※「サラヤ ジアクロス専用液」には、次亜塩素酸ナトリウムが配合されていますので、下記の内容にご注意ください。

※清拭後の環境表面は、十分に乾燥させ、必ず水拭きを行ってください。

サラヤ ジアクロス専用液を含浸させた後は下記の内容にご注意ください。



製品仕様

サラヤ ジアクロス 80枚入 容器・詰替

1枚サイズ：140×210mm
枚 数：80枚



※詰替1袋にフタが1個と開封日記録シールが付いています。

サラヤ ジアクロス 専用液

成 分：次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、水酸化ナトリウム
容 量：230mL



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ ジアクロス	80枚入容器	20	42386	49-87696-42386-2
	80枚入詰替	20	42410	49-87696-42410-4
	230mL専用液	20	42385	49-87696-42385-5

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。

■ 記載内容は2025年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)