

# SARAYA

商品の詳しい情報は  
こちらから▶



Personal Protective Equipment

一般医療機器 届出番号: 27B1X00120000400  
非天然ゴム製検査・検診用手袋

# ハイブリッドグローブ さくら

## Hybrid Gloves Sakura

加硫促進剤フリー ラテックスフリー パウダーフリー

プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより、  
従来のプラスチック手袋に比べて伸縮性やフィット感が向上しました。



さくらの花びらを  
イメージしたデザイン

ハイブリッドグローブ さくら  
XS・S・M・Lサイズ 150枚入

## 特徴

- ニトリル成分配合により、心地よいフィット感があります。
- やわらかい印象のさくら色を採用しました。
- ラテックスアレルギーの原因となる天然ゴムラテックスを含みません。
- アレルギー性接触皮膚炎の原因となる加硫促進剤を含みません。
- 手首側から一枚ずつ取り出せるため、指先部分を汚染せず衛生的に取り出して装着できます。



## ご使用方法

### 手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計 ※横に設置した場合

#### 箱のご使用方法

- 1 使い始めに開けてください。手首側から取り出すことができます。



- 2 残量が少なくなってきたら開けてください。

### PPEホルダー使用でさらに便利

#### PPEホルダーでのご使用例



#### 横置き ※推奨使用方法

PPEホルダーを左右逆にして使用



#### 縦置き

手首側の取出口が上に来る状態での使用を推奨


## 仕様

- 【材 質】 ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂  
 【カラー】 さくら色  
 【タイプ】 パウダーフリー

サイズ	XS	S	M	L
全長(mm)±5mm	235	235	240	245
掌幅(mm)±5mm	80	85	95	105


## 着脱方法 (例)

### 着け方

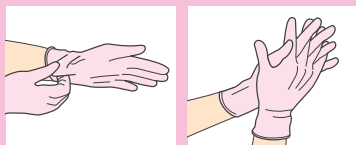

- 1 手首の部分をつかんで装着する
- 2 指先部分をフィットさせる

### 外し方

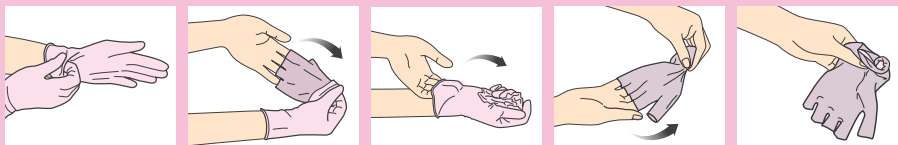

- 1 片方の手袋の袖口をつかむ
- 2 手袋を裏表逆になるように外す
- 3 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む
- 4 裏表逆になるように外す
- 5 外した手袋はすぐに廃棄する

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ハイブリッドグローブさくら	150枚 / XS	10	53521	49-87696-53521-3
	150枚 / S		53518	49-87696-53518-3
	150枚 / M		53519	49-87696-53519-0
	150枚 / L		53520	49-87696-53520-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2024年3月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00～18:00)