


いのちをつなぐ

SARAYA

サラヤ

口腔ケア用スポンジブラシ

- 歯ブラシ感覚の長方形のスポンジ
- 凹凸側面でお口をすっきりきれいに
- 平らな部分で舌をみがきます

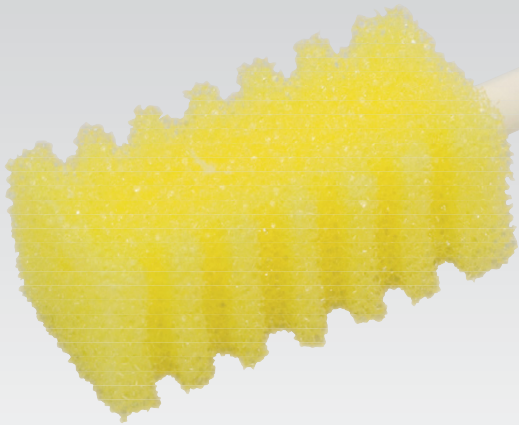

たくさん使える

大容量タイプ




入数 / 150本 (30本入 x 5袋)

製品特長


- スポンジの小さな穴が、汚れをキャッチします。
- 凹凸側面が歯の表面・歯ぐき・すきま・舌などの汚れを効果的に取り除きます。
- 水や保湿剤を浸してお使い頂けます。
- 長方形のスポンジが、歯ブラシ感覚でお使い頂けます。

使用方法


- ① スポンジ全体を前後左右に動かしながら、歯の表面をきれいにします。

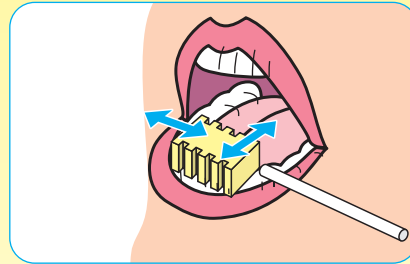


- ② スポンジ全体を回転させたり、左右に動かし、歯ぐきやすきまの汚れを取り除きます。

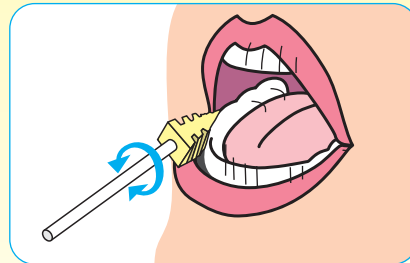

- ③ スポンジの平らな部分で前後に動かして舌をみがきます。

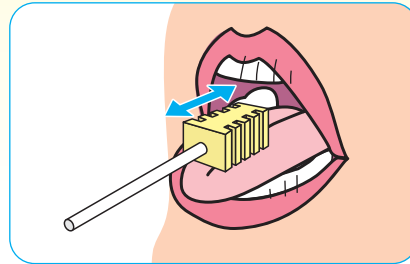

仕様

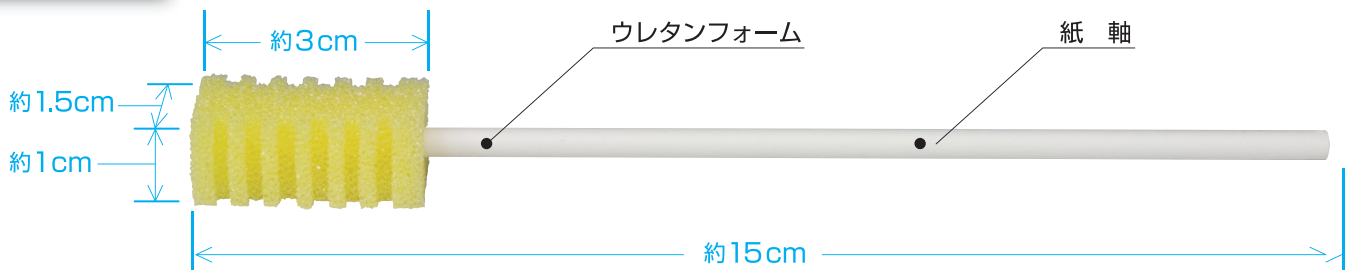

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ口腔ケア用スポンジブラシ	30本×5袋 (150本入)	8	42396	49-87696-42396-1

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2012年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-7668-8139 <http://www.saraya.com/>

