

新呼吸

— より薄く、より軽く。 —

従来品よりさらに **15%** 通気性UP



[日本製] NIOSH認証N95規格マスク

NafiaS[®] - N95

NafiaS[®]-N95は、日本で唯一の繊維学部を持つ信州大学と共同開発した、先端ナノファイバー素材「NafiaS[®]」を採用したN95認証マスクです。

研究



SHINSHU
UNIVERSITY

信州大学 繊維学部
国際ファイバー工学研究拠点


開発・製造

NafiaS



※NafiaS[®]は株式会社ナフィアスの登録商標です。


NafiaS[®]-N95

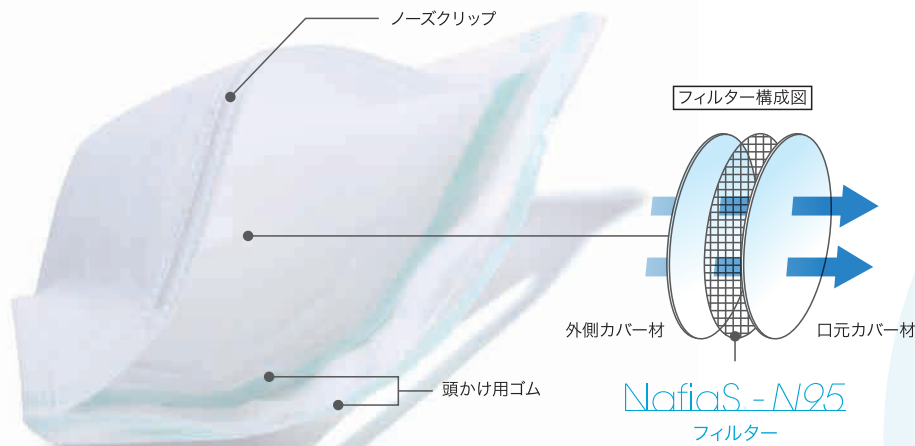

NafiaS[®]-N95は内側に“微粒子より小さく空気より大きいメッシュ構造のフィルター” NafiaS[®]を採用しています。空気中の微粒子はフィルターの間隙を通過することが出来ない為、体内に取り込む空気をクリーンに出来ます。




流す、捕らえる、これからの繊維

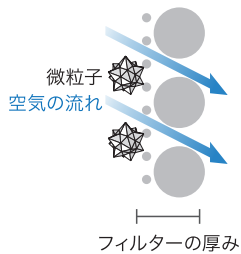

NafiaS-N95 フィルター

繊維径が小さいため、空気の流れる空間を確保しながら、微粒子を捕集。微粒子は表面で捕らえられるので、フィルターの目が詰まりにくい。

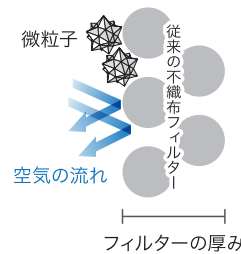

従来のフィルター

繊維径が大きいため、空気の流れる空間を遮断している。また、微粒子がフィルターのムラに入り込み目を詰まらせてしまう。

NafiaS[®]-N95マスクは、NafiaS[®]フィルターの進化により、**当社従来品よりも更に15%呼吸がしやすく^{*}** になりました。

微粒子捕集効率

95%以上

吸気抵抗^{*}

100 Pa以下

※ [当社調べ] マスク形状での自社測定結果であり、保証値ではありません



	サイズ	重量	入数	JANコード
化粧箱	280×95×100mm	約230g	30枚/箱 (個包装有り)	4589818570173
段ケース	500×295×225mm	約2.7kg	10箱/ケース (300枚)	4589818570180

製品情報	
品名	マスク(ナフィアス N95マスク)
型番	NFS-9502 Medium
対象	粉塵
サイズ	ミディアム
原産国	日本
認証番号	TC-84A-9252

注意事項: ●着用際には化粧箱に記載の着用手順を参照し、隙間を作らないよう正しく着用して下さい。また、正しいフィットが得られない場合は、使用を控えて下さい。●このマスクは酸素を供給するタイプのものではありません。酸素濃度19.5%未満の場所では使用できません。●マスクが破損したり、呼吸が苦しくなったときは、すぐにその場から退去して下さい。●マスクが汚れたりゴムバンドが破損した場合には、新品のマスクに交換してください。

【製造発売元】

株式会社 ナフィアス
ホームページ www.nafias.jp
〒386-8567 長野県上田市常田3-15-1
信州大学繊維学部内 Fii施設411

NafiaS[®]

【販売元】

SARAYA サラヤ株式会社
ホームページ <https://www.saraya.com/>
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~18:00)