



## 介護・医療現場での口腔ケアに

柔らかタッチで口腔内全般のケアを

# 口腔ケア スポンジブラシ

プラスチック軸で衛生的な個包装



### 製品特徴

- 汚れを取りやすく、  
ジェルタイプの保湿剤も  
なじみやすい形状です。(図1)
- 柔らかさにこだわった、  
きめの細かいスポンジを  
使用しています。
- 七角形の持ちやすい  
プラスチック軸です。(図2)



個包装  
**50**本入

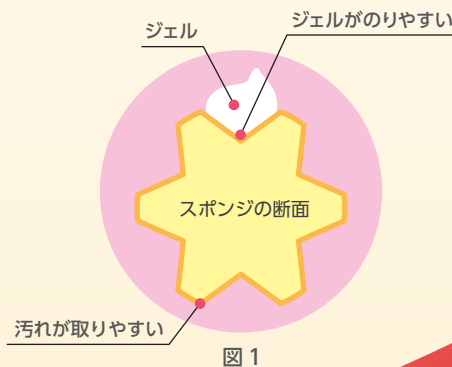


図1

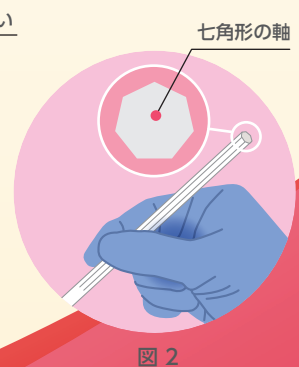


図2


OraCare  
**オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ**

**口腔ケアの実践で、健康維持が期待できます。**

おいしく食事をしたり、QOL向上のためにも口腔内を清潔にしましょう。


OraCare  
**オラケア口腔ケア用スポンジブラシは、**  
 お口の粘膜を柔らかタッチでケアできるスポンジブラシです。  
 汚れが取りやすいだけでなく、  
 保湿剤をなじませて塗り広げやすい形状です。

OraCare  
**オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ**

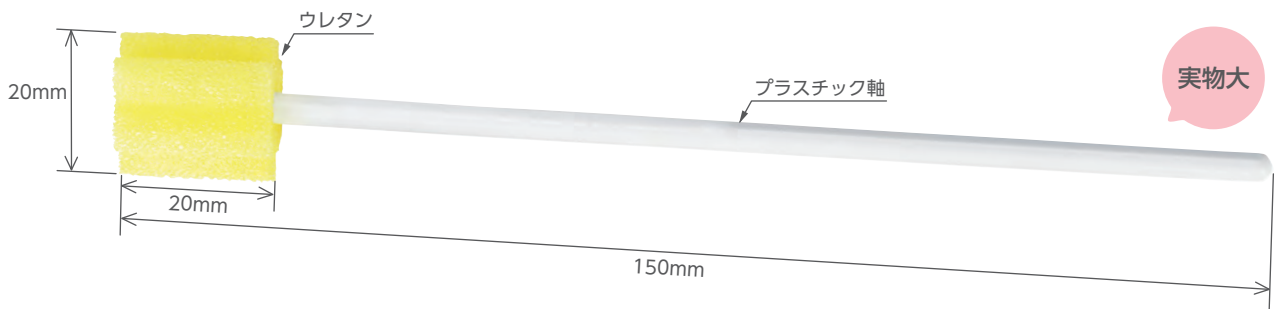

**こんな方に** ● うがいや口のゆずぎが出来ない方 ● 誤嚥しやすい方 ● 保湿剤をお使いの方 ● 口が開きにくい方

**オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ ご使用方法**

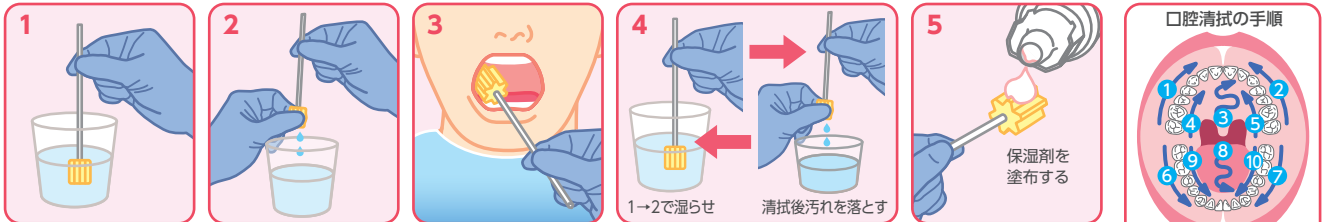

1 スポンジブラシを水などで湿らせます。  
 2 スポンジブラシを固くし、水分をきります。  
 3 スポンジブラシを回転させ、口腔内の汚れを巻き取りながら清拭します。  
 4 異なるコップを使用して、巻き取った汚れを適宜洗い落としながら1→2→3の順で清拭を繰り返します。  
 5 洗浄後 保湿剤をスポンジブラシになじませ、口腔粘膜に塗布します。  
 ※ 歯間清掃には歯ブラシや歯間ブラシをご使用ください。

※1度ご使用いただいたブラシは、繰り返し使用しないでください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
オラケア 口腔ケア用スポンジブラシ	50本入	20	42450	49-87696-42450-0

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

**サラヤ株式会社**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00～18:00)