


Gargling Etiquette

うがいでエチケット。

— うがいで感染予防、口臭予防。 —

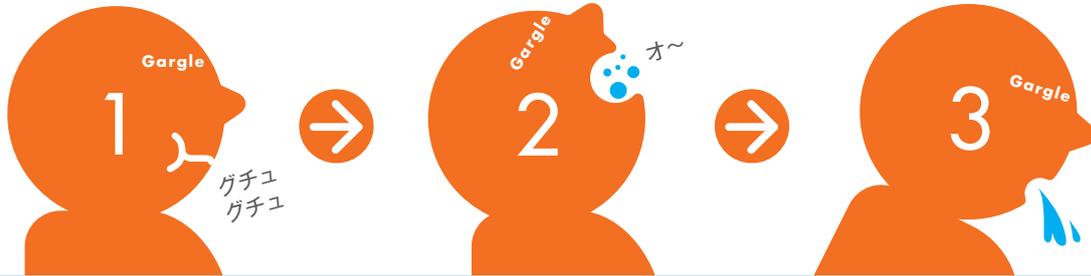

コロコロ自動うがい器

CO-SA型 環境対応型 [床置型]



(社)日本水道協会認証登録品

これからのうがいを考えたら
シンプル&エコになりました。

ペダルを踏むだけで、適正倍率に希釈されたうがい液がノズルから出る、コップいらずの自動うがい器です。

1. 電源不要 ここがエコ!!

電力(電気、電池)を使用しないエコ設計です。給排水の設備工事だけで簡単に設置できます。

2. 水使用量 約50%削減 ここがエコ!!

「洗浄水ペダル」を踏むとシンクに洗浄水が流れます。うがい液ペダルを踏むたびに洗浄水が流れる従来機種*と比べて、シンク洗浄にかかる洗浄水の使用量を減らすことができます。

《試算条件》1日あたり50人が1台のうがい器を使用する。うがい1回につき、うがい液ペダルを3回踏んでうがい器を自動させる。従来機種*の場合、うがい液ペダルを踏むことで自動的に洗浄水が流れる。CO-SA型の場合、うがい液ペダルを3回踏んだ後に洗浄水ペダルを踏み、洗浄水を1回流す。

1日の水使用量/46.6L(従来機種*)→23.8L(CO-SA型)

3. 本体重量 約50%削減 ここがシンプル&エコ!!

うがいに必要な最低限の機能に絞りこみ、本体・付属品・梱包を見直しました。シンプルにしたことで本体重量が従来機種*に比べてスリムになり、輸送・搬入もしやすく、省資源化につながりました。

本体重量(薬液・梱包部品を除く)/34kg(従来機種*)→16kg(CO-SA型)

*従来機種=CO-SG型



SARAYA

洗浄水ペダルできちんとキレイ

「洗浄水ペダル」を踏めば、洗浄水を流すことができますので、使用後のうがい液や汚れを天板に残さず清潔に保てます。



- ### 使用手順
- 01 「うがい液ペダル」を踏み、うがい液を口に含みます。
 - 02 うがいを行います。うがいが終わったら、天板にうがい液を吐き出します。
※これを数回繰り返します。
 - 03 「洗浄水ペダル」を踏み、天板を洗浄します。

うがいの効用

- のどの粘膜や血管を刺激し、同時に粘液の分泌や血行を盛んにして、抵抗力を強化します。
- 乾燥しがちなのどの粘膜に十分な湿分を補給し、粘膜の働きが弱まるのを防ぎます。
- のどと口腔の洗浄と消毒が同時にできます。(当社うがい薬使用の場合)
- 口臭の発生を 방지、口腔内を殺菌・消毒し、虫歯を予防します。(当社うがい薬使用の場合)


一般的なうがいのタイミング



うがい器・うがい薬の設置場所(例)



仕 様	
項 目	内 容
名 称	ココロ自動うがい器
型 式	CO-SA型
認 証 登 録 番 号	給水器具:Z-43((社)日本水道協会)
外 形 寸 法	W348×D359(ペダル含む)×H1,052(ノズル含む)mm
製 品 質 量	約16kg(薬液、付属品、梱包部品除く)
材 質	ノズル部………SUS303、C3604(ニッケルクロームメッキ)、PP ノズルカバー…ABS(ニッケルクロームメッキ) 天 板………SUS304(ステンレス鋼板) 本体部………SPCC(塗装)
給 水 圧 力	0.1~0.75MPa(減圧弁を使用)
給 水 接 続 口	G1/2おねじ
排 水 接 続 口	呼び径25
使 用 環 境 温 度	0~35℃(凍結なきこと)
使 用 環 境 湿 度	20~85%(結露なきこと)
う がい 液 吐 出 量	1.2L/分
洗 浄 水 吐 出 量	2.4L/分(調整可能)
使 用 薬 液	うがい薬ココロ、うがい薬ココロSP
別 売 オ プ シ ョ ン 品	洗眼器A型(専用ブラケットにて固定)

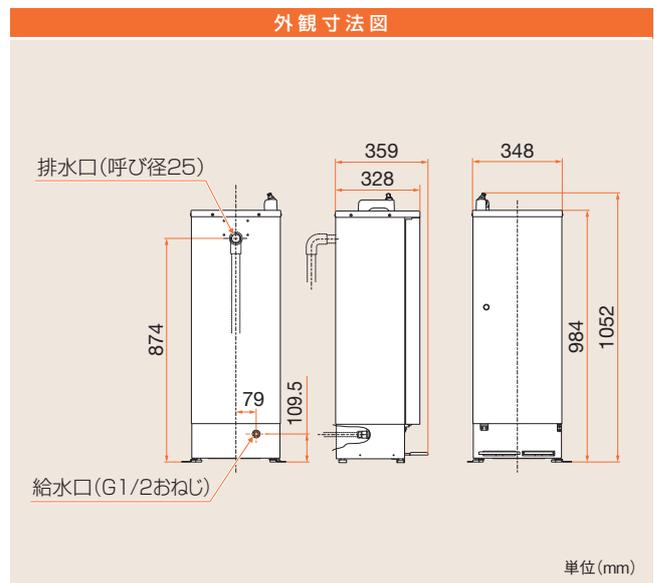

品 名	内容量 / 規格	1 梱入数	商品コード	JANコード
ココロ自動うがい器 CO-SA型	CO-SA	1	11030	49-87696-11030-4

**安全にお使い
いただくために**

- 商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。
他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、お使いにならないでください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合があります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- このカタログは2010年7月現在のものです。

SARAYA サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>