



## サラヤ リユースガウン/リユースキャップ




REUSABLE GOWN / REUSABLE CAP

Personal Protective Equipment

- 特殊(フッ素フリー)撥水剤加工により300回の再使用を可能にしました。
- 再使用することで、プラスチック削減に繋げ、環境負荷を軽減します。
- 着心地の良いポリエステル100%を使用しています。



再処理回数シート

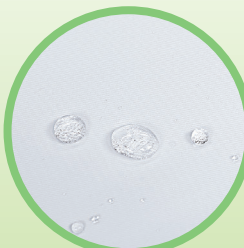

撥水性



親指フック式



クリップ



マジックテープ

留め方を選択できます。

## 用途

- (1)患者のケア中に、湿性生体物質が衣類や皮膚に飛散したり、跳ね返ったりする可能性がある場合
  - 嘔吐、吐血や喀血のある患者のケア時
  - 接触感染する微生物が検出されている患者への濃厚接触時(全身清拭など)
  - 広範な熱傷や開放創などの処置・ケア時
  - 気管吸引時など
- (2)湿性生体物質で汚染される可能性がある場合
  - 排吐物、尿や便などの湿性生体物質の処理時
  - 医療器材等の洗浄・消毒時など
- (3)患者に対し医療・介護従事者のユニフォームからの汚染を遮断する必要がある場合

## 使用上の注意

- 本品は未滅菌です。
- 再生処理にて、マジックテープが変色する恐れがありますが、品質には影響ありません。
- ピンホールを発見した場合、ご使用はお控えください。
- 洗濯機、乾燥機にて処理する際、クリップが変形する恐れがあるため、クリップを外すか、60℃以下での処理をお願い致します。

## 着脱方法(例)

### 着け方



### 外し方



## 再使用(洗濯)の方法

- 一般の洗濯機で洗濯可能です。
- 熱水による洗濯も可能です(目安:80℃・10分)。※ただし、首のクリップは外してください。
- 0.05%~0.1%の次亜塩素酸ナトリウム溶液に30分間浸漬し、洗濯後、再使用可能です。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤリユースガウン	フリーサイズ	10枚	50964	49-87696-50964-1
サラヤリユースキャップ	フリーサイズ	10枚	50965	49-87696-50965-8

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938  
 (受付時間：平日 9:00~18:00)